

INSTRUCTIVO DE RECEPCION

1. Objetivo

Efectuar de manera correcta la toma y remisión de muestras para el diagnóstico de Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina (QIB).

2. Material necesario

- Hisopos estériles.
- Medio de transporte de Hank's (virología).
- Hisopos de algodón estériles con medio de transporte Stuart (bacteriología).

3. Instrucciones para la toma de muestras

1. Seleccionar animales con estadios iniciales de QIB (lagrimeo – edema de párpados).
2. Muestrear animales sin tratamiento previo con antibióticos.
3. Identificar los números de caravana de los animales a muestrear y rotular los tubos con los medios de transporte.
4. Tomar las muestras con los hisopos estériles del saco conjuntival (ingresando el hisopo por detrás del tercer párpado). Utilizar primero el hisopo en bolsa estéril individual, descargar en el medio de Hanks y luego tomar, el hisopo estéril para bacteriología y colocarlo en el medio de Stuart.
5. Los tubos con los medios de transporte deberán ser destapados en el preciso momento de realizar el hisopado y cerrados inmediatamente después, cuidando de no apoyar la tapa en sitios sucios durante la tarea.

4. Forma de envío

Enviar inmediatamente los tubos rotulados al laboratorio en forma refrigerada.

I
M
I

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Responsable de área	Responsable de calidad	Dirección